


## REDCORD Workstation Professional z 3 trawersami

System REDCORD MEDICAL mocowany do sufitu. Unikalny i efektywny system do przeprowadzenia ćwiczeń funkcjonalnych metodą S-E-T za pomocą systemu podwieszek.

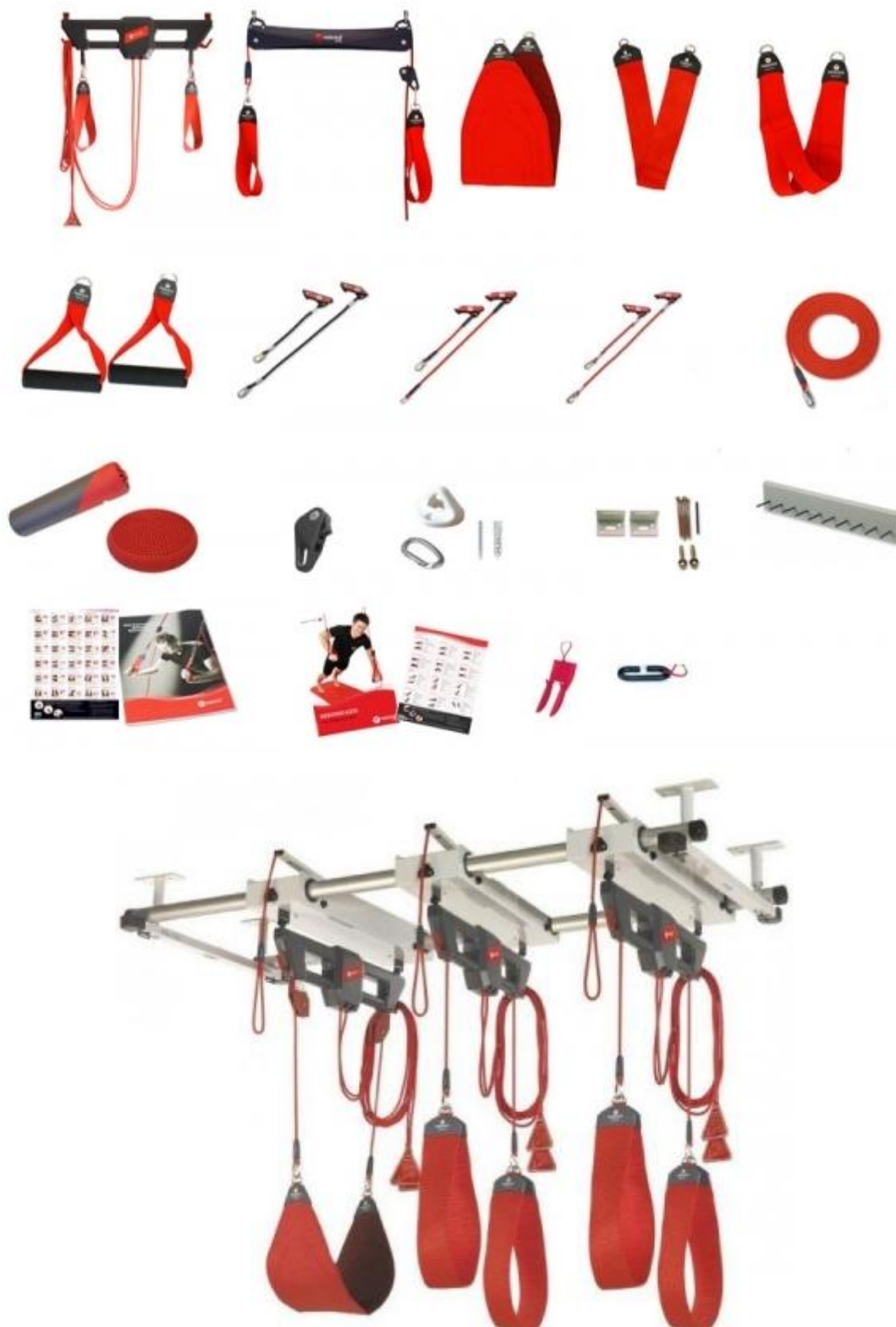

### Podstawowe właściwości

Profesjonalny zestaw treningowy i rehabilitacyjny z aparatami Redcord, linkami i podwieszkami Redcord. Zestaw z wytrzymałą konstrukcją sufitową, w pełni zaspokajający potrzeby kompleksowego treningu czy rehabilitacji.

Metoda Neurac wykorzystująca systemy Redcord to nowatorski program ćwiczeń w podwieszeniu z obciążeniem i odciążeniem pacjenta, ciesząca się uznaniem na całym świecie. Aparaty Redcord umożliwiają wszechstronną rehabilitację a także trening fitness dla amatorów i profesjonalistów.

Zestaw dla trzech aparatów Redcord mocowany do sufitu jest przystosowany do ćwiczeń w podwieszeniu metodą Neurac. W zestawie znajdują się trzy aparaty Redcord Trainer z kompletem linek, podwieszek. Aparat Redcord można zamontować bezpośrednio do sufitu bądź z wykorzystaniem szyn aluminiowych. Linki aparatu stanowią bazę, do której podpinamy podwieszki służące do wykonywania ćwiczeń w podwieszeniu. Zestaw Redcord Workstation Professional zawiera ponadto wałek rehabilitacyjny i dwie poduszki (berety) sensomotoryczne.

Dzięki zastosowaniu kombinacji kilku aparatów z podwieszkami Redcord fizjoterapeuta ma niespotykaną możliwość pełnego dostosowania parametrów rehabilitacji do potrzeb pacjenta.

#### Zastosowanie:

- Rehabilitacja
- Sport
- Fitness

#### Cechy charakterystyczne:

- Unikalny i efektywny system do przeprowadzenia ćwiczeń funkcjonalnych metodą Neurac za pomocą systemu podwieszek. Zestaw zapewnia pełne podwieszenie ciała i niezliczone możliwości terapeutyczne dzięki różnym kombinacjom naprężenia linek i odpowiednim podwieszkom.
- Wymiary konstrukcji sufitowej do aparatów Redcord: 180 cm x 77 cm
- Specyfikacja techniczna aparatu Trainer:
  - maksymalny udźwig: 250 kg
  - wymiary: 67 cm x 23 cm x 9 cm

#### Zestaw Redcord Workstation Professional z 3 trawersami (nr kat. 100023-3)

- Zestaw z konstrukcją sufitową, zawierający:
  - 1x aparat AXIS,
  - 3x aparat TRAINER,
  - 2x podwieszka szeroka,
  - 2x podwieszka wąska,
  - 1x podwieszka dzielona,
  - 1x linka 5 m z klamrą,
  - 2x linka 60 cm czerwona,
  - 2x linka 30 cm czerwona,
  - 2x linka elastyczna 30 cm czarna,
  - 2x linka elastyczna 30 cm czerwona,
  - 2x linka elastyczna 60 cm czarna,
  - 2x linka elastyczna 60 cm czerwona,
  - 1x wałek 15x50 cm,
  - 2x poduszka sensomotoryczna,
  - 4x para uchwytów zwykłych,
  - 1x para uchwytów POWER GRIP



#### INFORMACJA DOTYCZĄCA MONTAŻU ZESTAWÓW REDCORD

Optymalną wysokością, zapewniającą komfort użytkowania, na jakiej aparat lub zestaw sufitowy powinny się znajdować, to 240 cm. Standardowo każdy aparat lub zestaw sufitowy jest wyposażony w nóżki umożliwiające montaż na sufitach o wysokości 250-260 cm od podłogi.

Wzór na obliczenie długości nóżek:  $X = H - A$   
gdzie:

H – wysokość sufitu od podłoża

A – optymalna wysokość zamontowania aparatu / zestawu (zalecana wysokość 240 cm)

X – wymagana długość nóżek

Maksymalna wysokość pomieszczenia dla pojedynczych aparatów to 427 cm, a dla konstrukcji sufitowej 360 cm. W przypadku wyższych pomieszczeń zalecamy klientom rozważenie następujących rozwiązań:

1. Zakup konstrukcji wolnostojącej lub przyściennej (montaż konstrukcji przyściennej tylko do ściany nośnej, zapewniającej stabilność całej instalacji)
2. Montaż we własnym zakresie konstrukcji umożliwiającej zainstalowanie zestawu REDCORD w pomieszczeniu.



Dodatkowe nóżki dystansowe do konstrukcji sufitowych Redcord, długość od 30 do 120 cm